



ESDENT Tomografia Stomatologiczno-Laryngologiczna  
bezpiecznatomografia.pl

Poznań

577 488 788

- Grochowska 45A
- Rataje 166/lok.13
- Obornicka 291

Wrocław

733 933 212

- Pomarańczowa 8
- Wiktora Brossa 1D-1E


## OnDemand 3D Communicator

Instalacja programu  
Otwieranie badań  
Aktualizacja bazy implantów




- Instalacja programu (kroki 1-5)


1. Po otwarciu instalatora, kliknij „Next”.

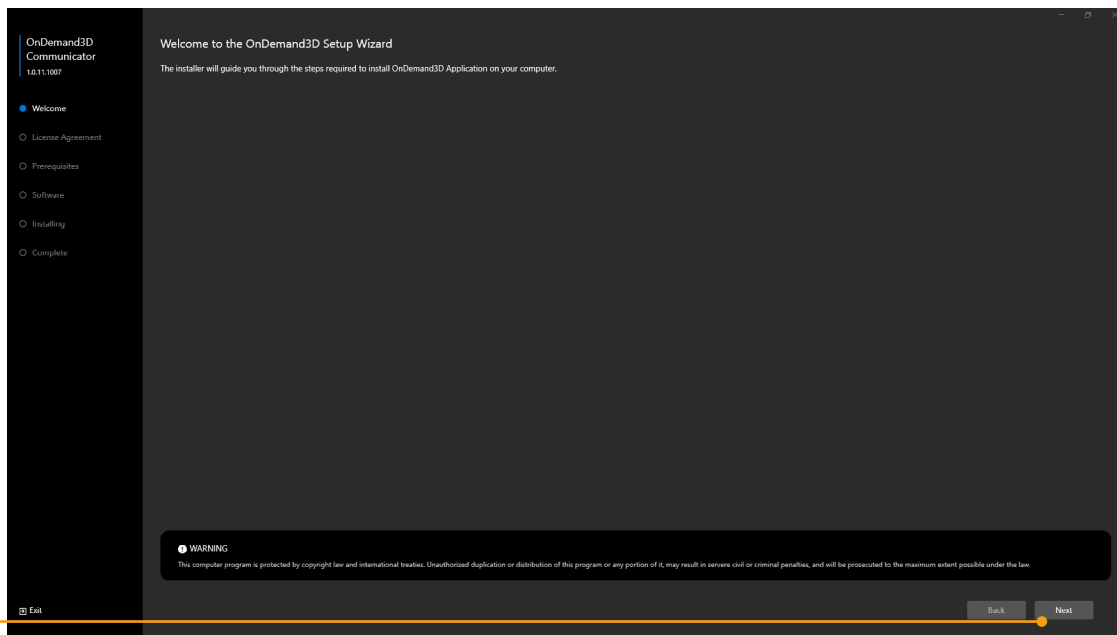


2. Zaakceptuj licencję, zaznaczając „I agree” i kliknij „Next”.

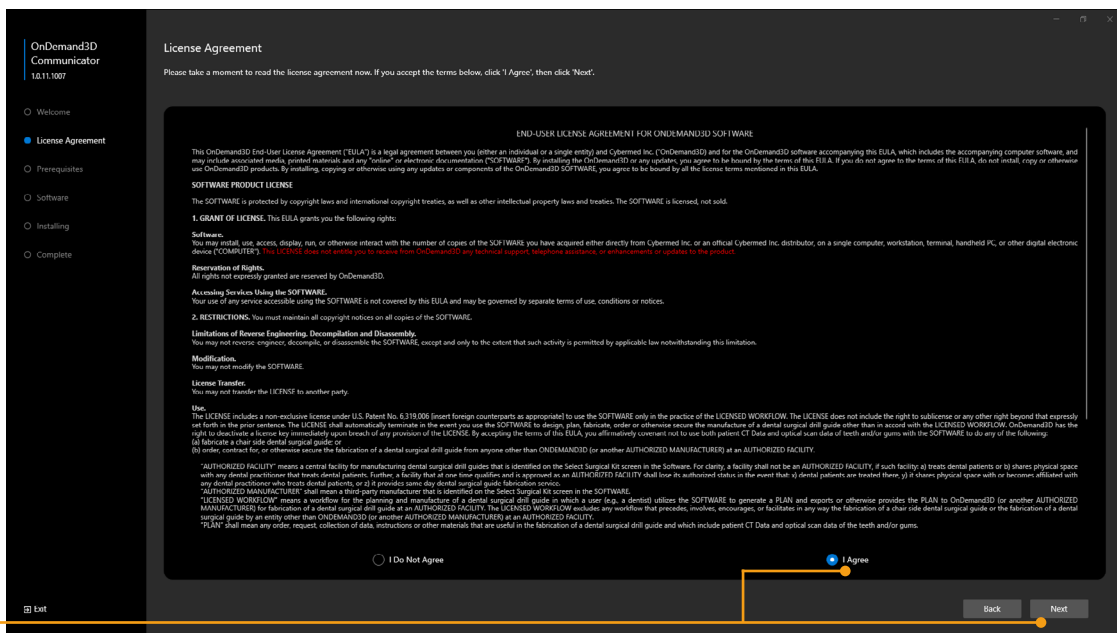


3. Kliknij „Next”.  
Jeśli zamiast tego pojawia się przycisk „Download”, kliknij go, a następnie kliknij „Next”.

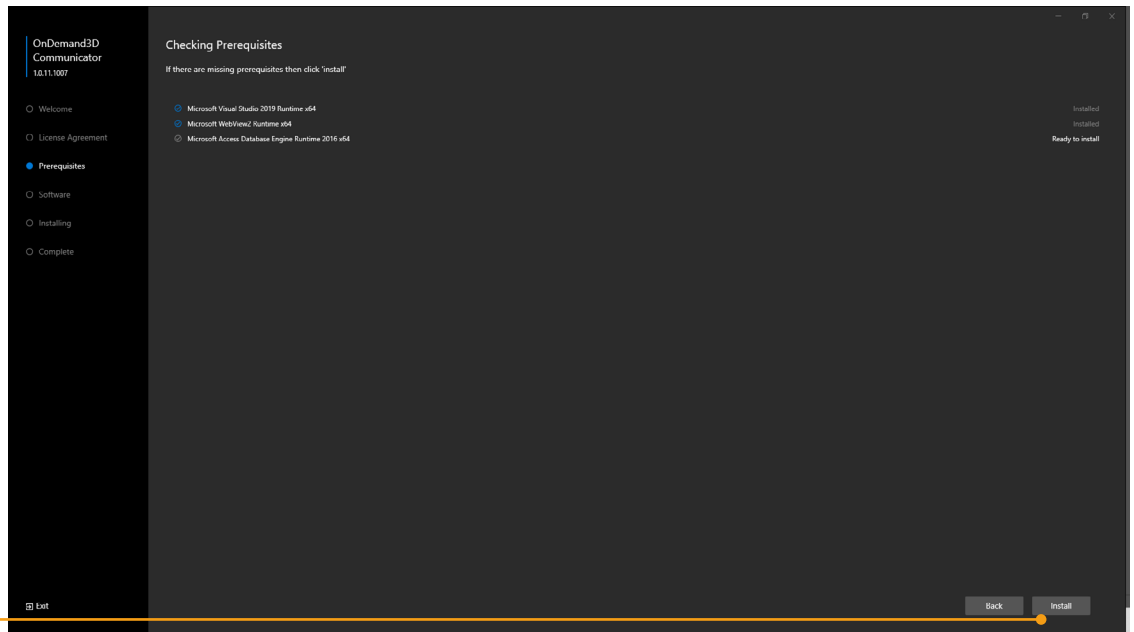

4. Z rozwijanego menu wybierz polski (Polish), a następnie kliknij „Next”. W innym przypadku program będzie w języku angielskim - późniejsza zmiana języka będzie wymagała będzie ponownej instalacji.

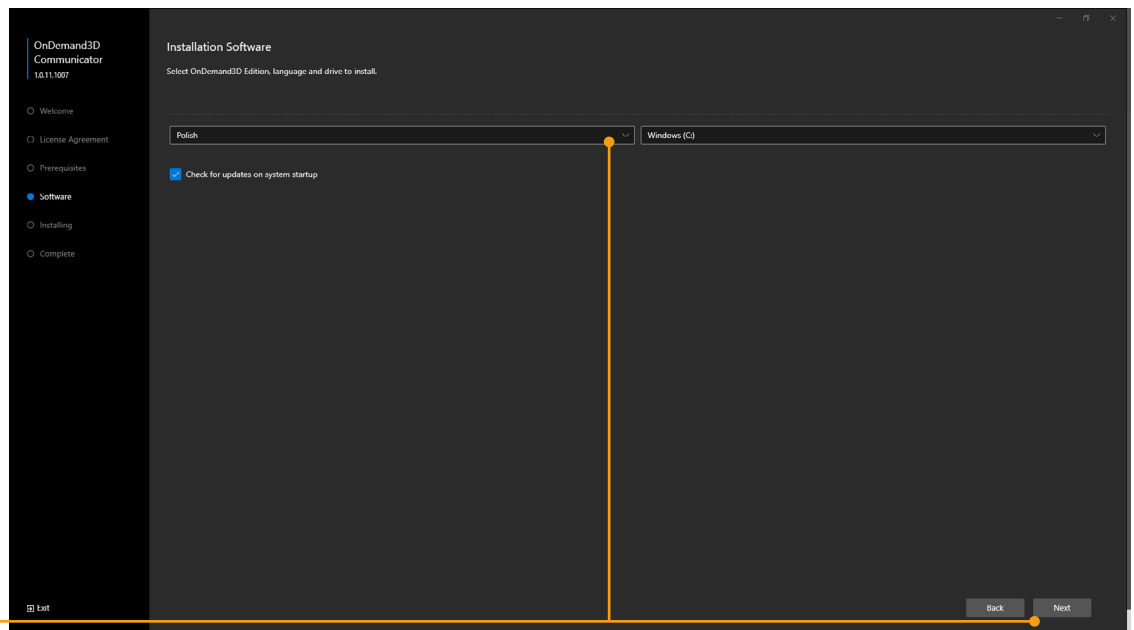

5. Instalacja zakończona, kliknij „Close”.

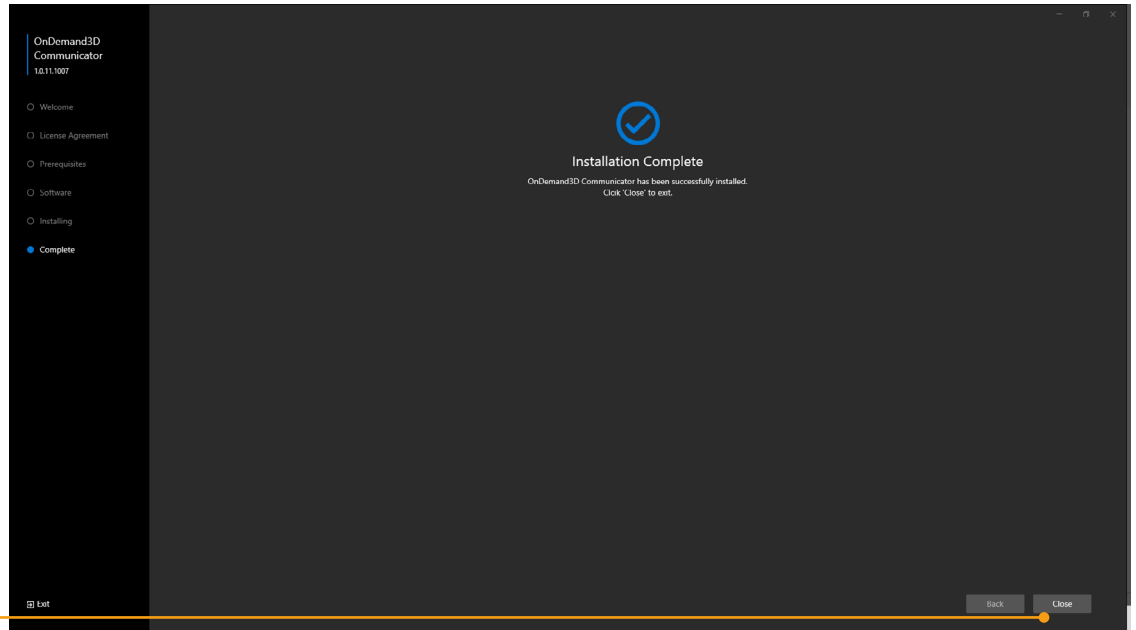

\*Program OnDemand 3D Communicator nie jest kompatybilny z poprzednią wersją oprogramowania.