


- Importowanie przesłanych badań do programu

W przesłanym badaniu znajdują się dwa elementy:
folder z badaniem i instalator OnDemand 3D Communicator.

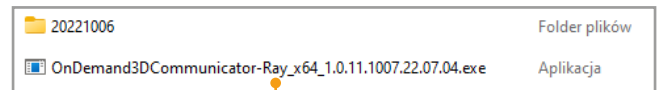


Aby otworzyć przesłane badanie:


1. Otwórz ponownie instalator OnDemand 3D Communicator klikając w niego dwa razy - mimo, że program jest już zainstalowany, to w taki sposób sam zaimportuje badania z folderu.
2. Zamknij instalator klikając „Close”
3. Otwórz program OnDemand 3D Communicator na Pulpicie klikając w niego dwa razy.

- Otwieranie badania (kroki 1-4)


1. Kliknij „Główna DB” jeśli badanie zostało zaimportowane w poprzednim kroku.

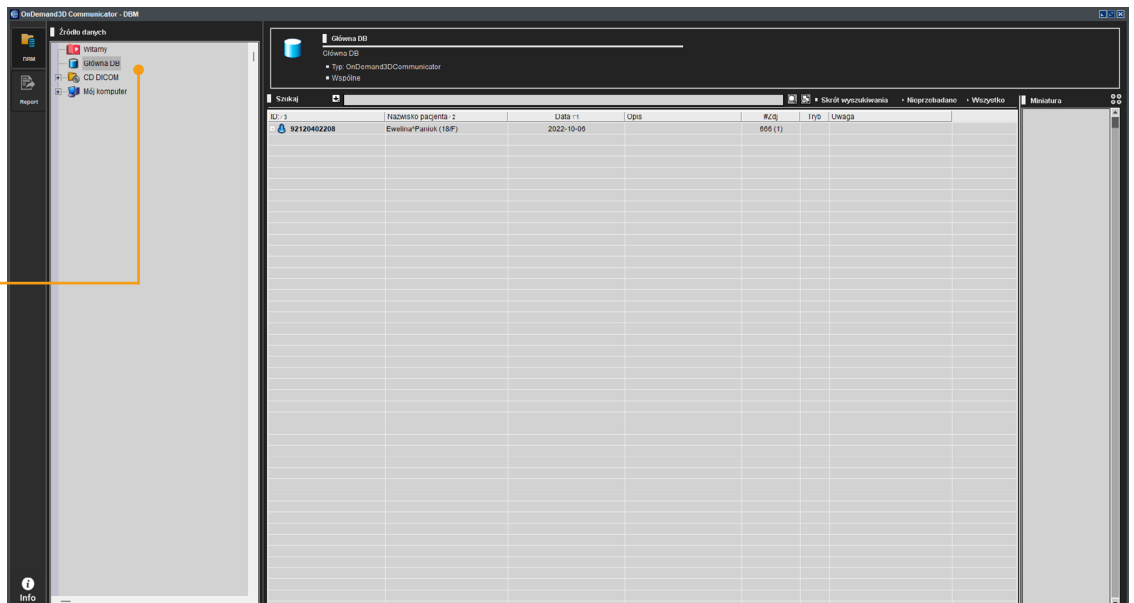

2. Kliknij ikonę plusa, a następnie kliknij dwukrotnie w „PRJ”.

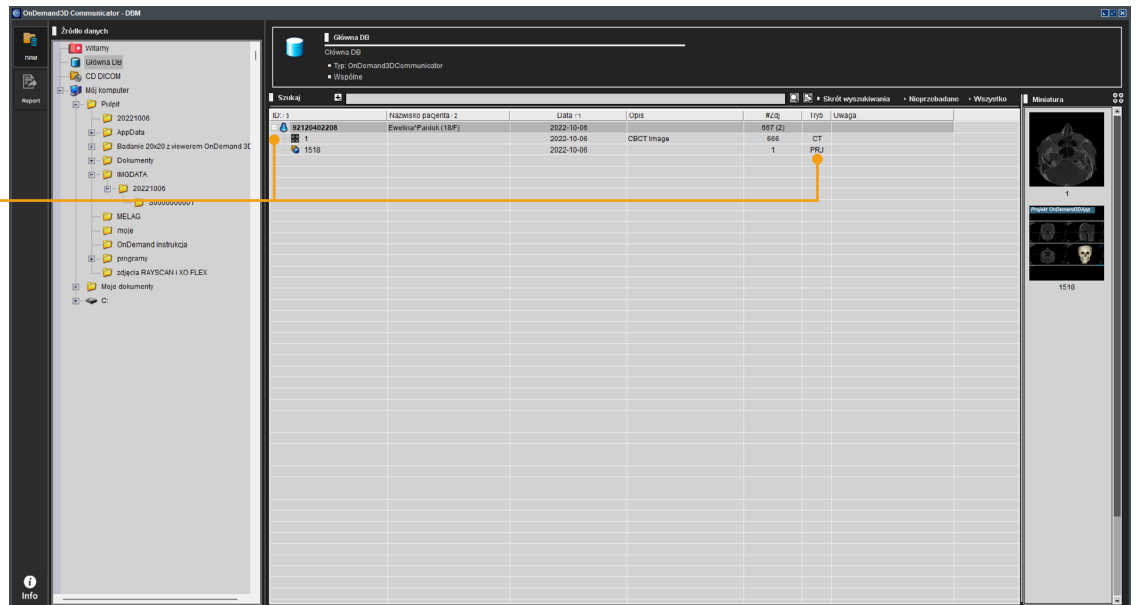

3. Kliknij „Otwórz”, lub wciśnij Enter.

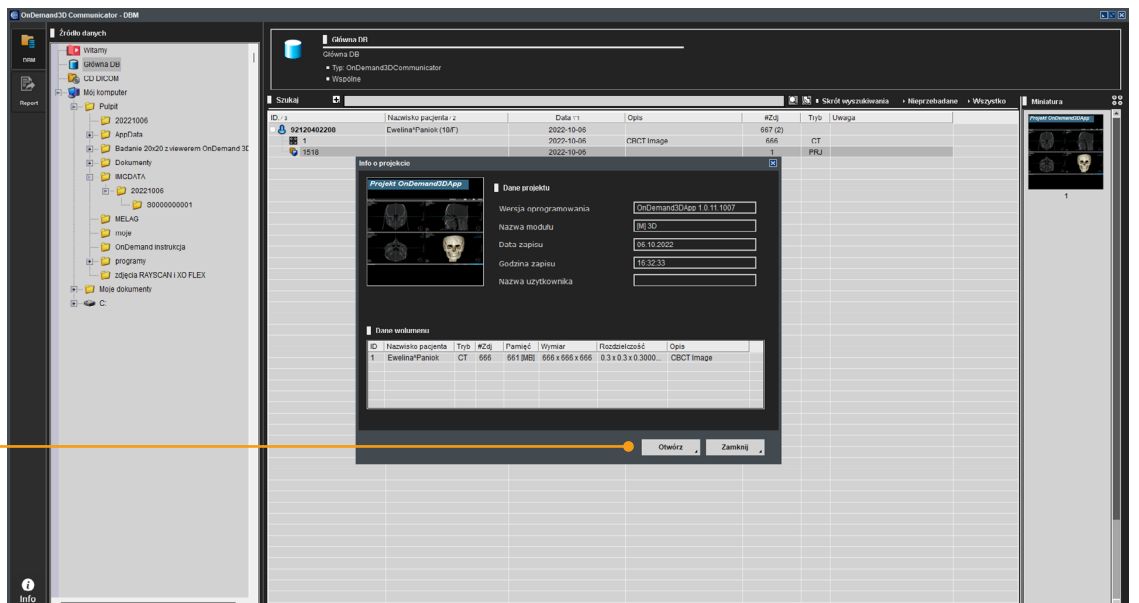

4. Program jest gotowy do analizy.

